


INFILTRARE / ANESTESIE folosiți canula 17G

60cc Kit

LANESTEZIE LOCALĂ		ANESTEZIE TOTALĂ	
250 ml	Soluție salină	250 ml	Soluție salină
1/2 vial 1cc	Adrenalină	1/2 vial 1cc	Adrenalină
30 cc al 2%	Lidocaină		

240cc Kit

ANESTEZIE LOCALĂ		ANESTEZIE TOTALĂ	
500 ml	Soluție salină	500 ml	Soluție salină
1 vial 1cc	Adrenalină	1 vial 1cc	Adrenalină
50 cc al 2%	Lidocaină		

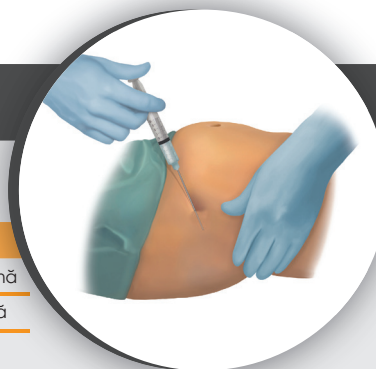

așteptați 8/10 minute

RECOLTAREA ȚESUTURILOR ADIPOASE folosiți canula 13G

TRANSFERAȚI ȚESUTUL RECOLTAT
În seringi de 10cc pentru decantare

PRELUCRAREA ȚESUTURILOR ADIPOASE

PAS 1

CONECTAȚI vârful liniei de intrare (capac **albastru / portocaliu / verde / galben / roz**) la puna salină

Așezați unitatea de procesare în poziție verticală cu capacul **gri** în sus. **DESCHIDEȚI** ambele linii, lăsați să curgă soluția salină și îndepărtați toate bulele de aer mișcând sau scuturând unitatea de procesare

ÎNCHIDEȚI* ambele linii




PAS 2

ROTIȚI unitatea de procesare cu capacul **albastru / portocaliu / verde / galben / roz** în sus și **ÎNCHIDEȚI*** linia de intrare.

CONECTAȚI siringa lipoaspirată ușor la supapa auto-ocluzivă (capac **albastru / portocaliu / verde / galben / roz**) și aveți grijă să nu strângeți excesiv.

DESCHIDEȚI linia de ieșire (capac **gri**)

INJECTAȚI lipoaspiratul menținând unitatea de procesare într-o poziție verticală la nivelul ochilor. Nu depășiți 15 cm și 80 cm la un moment dat pentru LGD 60 și respectiv LGD 240

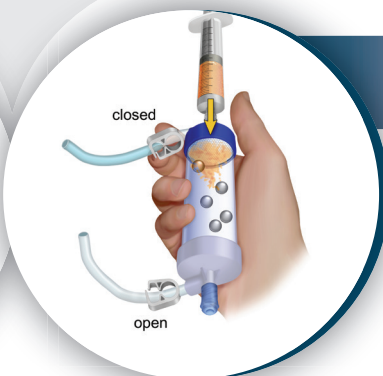


PAS 3

ÎNCHIDEȚI ambele linii și **agitați** energic timp de cel puțin 2 minute, deschizând liniile pentru clătire țesutul cu soluția salină la fiecare 20 de secunde

NU mai agitați când soluția salină din unitatea de procesare este **transparentă**

ÎNCHIDEȚI* ambele linii

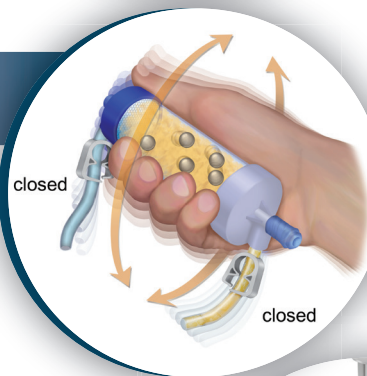

PAS 4


ROTIȚI unitatea de procesare și **PLASAȚI-O** în poziție verticală cu capacul **gri** în sus

CONECTAȚI două seringi de 10 ml luer lock la capetele unității de procesare

DESCHIDEȚI linia de intrare (capac **albastru / portocaliu / verde / galben / roz**)


UMPLEȚI siringa inferioară conectată la supapa de încărcare (**albastru / portocaliu / verde / galben / roz** capac) cu aproximativ 10 ml soluție salină

ÎNCHIDEȚI* ambele linii

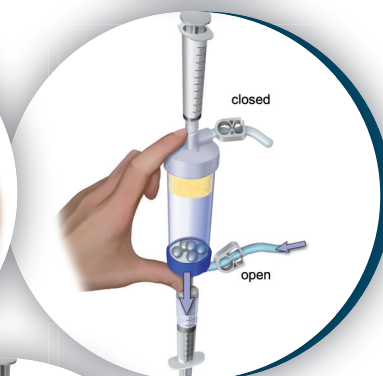

PAS 5

REINJECTAȚI FERM în unitatea de procesare soluția salină conținută în seringă conectată la (capac **albastru / portocaliu / verde / galben / roz**) păstrând în același timp unitatea de procesare în poziție verticală

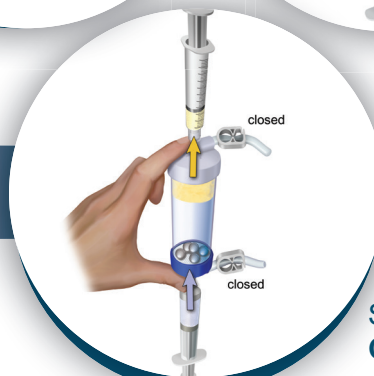

SERINGA conectată la supapa de deasupra (**CAP GRI**) va fi în consecință umplută cu **LIPOGEMS®** gata de utilizare

N.B. • 60cc KIT: volum maxim 15 cc pentru fiecare prelucrare
240cc KIT: volum maxim 80 cc pentru fiecare prelucrare

• Nu utilizați dispozitivul pentru mai mult decât două procesări

* utilizați numai clemele din plastic furnizate împreună cu dispozitivul